

FICHE TECHNIQUE**Détergent désinfectant surfaces hautes Capvital**

- Mousse détergente désinfectante parfumée.
- Destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces.
- Convient pour les revêtements de table d'examen et d'auscultation.
- Flacon prêt à l'emploi de 750 ml.

Ref : 2015100760

COMPOSITION

Ingrédients : Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Solution prête à l'emploi.

Bactéricide en 2 min, 20°C (EN 13727, EN 13697).

Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C (EN 13624, EN 13697).

Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus,

Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min, 20°C sur Coronavirus, Polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus et Adenovirus.

MODE D'EMPLOI

S'utilise sans dilution.

Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la zone à traiter ou de préférence sur un non-tissé. Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations).

Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Phrases R, S, T, EUH, H, P et Anios :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Utiliser dans des zones bien ventilées.

Porter des gants de protection.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Si besoin, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas réutiliser l'emballage. Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Conditions de stockage :

Stocker entre +5°C et +35°C.

Mentions réglementaires spécifiques :

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4). Usage réservé aux professionnels.

SOCIÉTÉS

Coordonnées :

Distribué par : CAPVITAL

ZA - 12 voie des Préaux - 89310 NITRY - FRANCE

capvital.fr

Tel. +33 3 86 81 63 63 - Fax. +33 3 86 81 58 76

Fabriqué par : Laboratoires ANIOS

1, rue de l'espoir - 59260 LEZENNES - FRANCE

www.anios.com

Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 67 67 68

