

Manuel d'utilisation **du support de douche**

MANEA




Merci de lire attentivement la notice
du produit avant toute utilisation.

Notice à conserver.

Sommaire

1. Description	4 - 5
2. Caractéristiques	6 - 7
3. Installation	8 - 9
4. Désinstallation	10
5. Usages	10
6. Conditions d'utilisation...	11 - 12
7. Entretien	12
8. Garantie	12 - 13
9. Certification de conformité ..	13
10. Destruction et recyclage ..	14
11. Lien utile	14

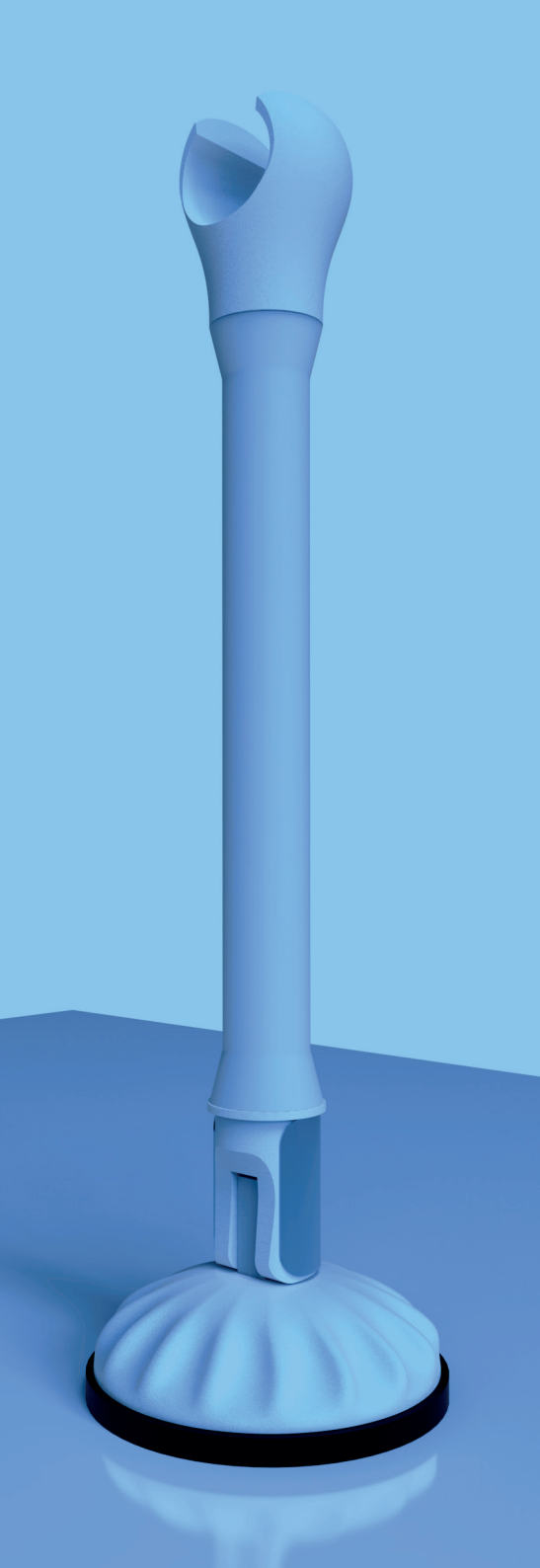

Description 01

Le support de douche Manea est un accessoire qui se distingue par l'association de son design et de son ergonomie.

Son bras flexible est stable et facilite l'orientation du pommeau à la convenance de son utilisateur.

Le support de douche Manea apporte confort et sécurité à ses utilisateurs dans la douche. Ce support ergonomique se fixe à l'aide d'une ventouse et se verrouille par une rotation de la bague en acier inoxydable autour de son axe.


Il s'adapte à tous les espaces et à de multiples parois.

Caractéristiques 02

1. Composition :

- Plastique recyclable
- Acier inoxydable
- Silicone

2. Dimensions :

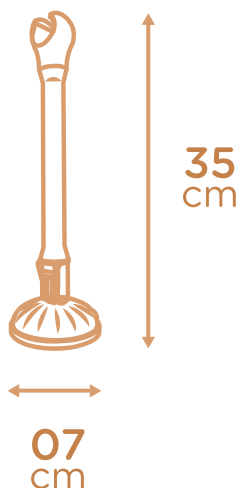

3. Poids :

349 g

Pince

Universelle, elle permet de fixer tous les pommeaux de douche.



Bras flexible

Inspiré du design d'une lampe. Il vous permet d'adapter le bras à votre convenance. Vous pouvez le tordre jusqu'à 90°.



Bague en inox

Elle permet de verrouiller le bras flexible pour plus de sécurité et de stabilité.



Socket

Inspiré des prises d'escalade. Il vous permet d'avoir une bonne prise et un bon maintien de la ventouse.



Ventouse

Elle mesure 7 cm de diamètre et vous permet de fixer n'importe où le bras flexible et sur les parois prévues à cet effet.



Installation 03


Sortir l'accessoire de son emballage et suivre les instructions. L'installation du support de douche ne nécessite aucun outil.

Accrocher le pommeau à la pince uniquement après la mise en place du bras flexible.


1. Choisir une surface lisse, adhérente, plane, propre, sèche et sans fissure capable de supporter la charge maximale (1,5 kg) de l'accessoire. Les supports type placoplâtre enduit ou peint, le papier-peint, etc. sont à exclure absolument. La présence d'aspérités sur la surface (faïence, marbre, ...) peut nuire au maintien de la ventouse. Ne pas placer la ventouse sur les joints de faïence.

2. Nettoyer la surface avec une éponge humide afin d'enlever toutes traces de calcaire, puis sécher la surface à l'aide d'un chiffon sec. Ceci afin d'assurer une meilleure adhérence de la ventouse.

3. Placer le support de douche en position verticale, la pince vers le plafond, le bras parallèle au mur et la ventouse contre le mur. Humidifier la ventouse si nécessaire.

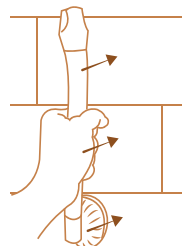

4. Abaisser le bras flexible sans forcer.

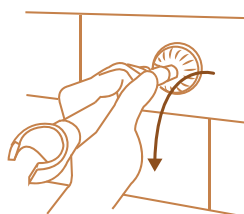

5. Verrouiller avec la bague par rotation de 90° (à droite ou à gauche) autour de son axe.



6. Avant de positionner le pommeau, vérifier la bonne adhérence de l'accessoire sur sa surface. Nous vous conseillons d'orienter le flexible avant de placer le pommeau.

Désinstallation 04

Pour désinstaller le support de douche : déverrouiller à l'aide de la bague, relever le bras flexible parallèle au mur, puis ôter l'accessoire de sa surface. Si la ventouse est difficile à enlever, exercer un mouvement de gauche à droite à l'aide du bras flexible.

Usages 05


Votre accessoire Manea vous apporte plus de confort et de sécurité dans la douche grâce à son ergonomie et est dédié aux usages suivants :

- Le support de douche est uniquement destiné à tenir un pommeau de douche.
- Le flexible sur ventouse est exclusivement réservé au maintien d'un objet de 1,5 kg maximum comprenant la pression de l'eau.
- Le diamètre de la ventouse permet de résister à une pression d'environ 14 kg.

Conditions d'utilisation 06

La longueur du flexible permet de le plier selon un angle maximum de 90° à partir de sa position initiale (droite), **toute manipulation du flexible au-delà des 90° risque d'endommager sa structure**, de causer son usure prématurée voire son inutilisation.

Afin de courber le flexible plus facilement, placer les mains aux extrémités du flexible comme sur le schéma.

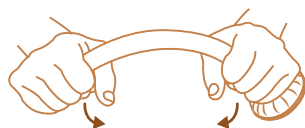

Ne pas former un U avec le flexible. Utiliser le support de douche à ventouse pour l'usage prévu.

L'accessoire **Manea n'est pas une barre de maintien**. Ne pas se suspendre au support de douche Manea.

Ne pas utiliser le support de douche sur des surfaces non adhérentes.

La bonne adhérence du support de douche Manea doit être vérifiée avant chaque utilisation.

Ne pas modifier la structure de l'accessoire Manea et ne pas le réparer soi-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.

Entretien

07

Un entretien soigné de votre accessoire Manea augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses fonctions au quotidien.

Nettoyez régulièrement votre accessoire Manea à l'eau et au savon. Quand vous décrocherez votre accessoire, nettoyez et séchez-le bien, ainsi que la surface adhérente avant de procéder à sa remise en place en suivant les instructions d'installation.

Garantie

08

L'accessoire Manea est garanti 2 ans à partir de la date figurant sur le bon de livraison.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux. Elle ne couvre pas l'usure normale ni l'endommagement de votre accessoire Manea.

Certification de conformité

09

Le support de douche Manea est conforme à la Directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits.

Destruction et recyclage

10

L'accessoire Manea hors d'usage doit être jeté dans la poubelle jaune destinée aux déchets recyclables. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

Lien utile

11

www.manea-france.fr

MERCI

MANEA



S.A.S MY AUTONOMY

54 rue Molière
94200 Ivry sur seine