



Notice d'utilisation et d'entretien

FAUTEUILS VHP à pousser

STARLEV' II - LIBERTY – LIBERTY e II


EVASION – EVASION e



7 avenue Bernard Pleds 10110 BAR-SUR-SEINE – FRANCE
Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12
Web: www.innov-sa.com - Email: innovsa@innovsa.com
Date de validité mars 2020 – Version 3 – Notice à conserver



SOMMAIRE

<u>1. PRESENTATION GENERALE</u>	P 3 à 4
A) Aide et accessibilités 	P 4
B) Consignes générales de sécurité	P 4
<u>2. UTILISATION DU FAUTEUIL</u>	P 5 à 6
A) Environnement d'utilisation	P 5
B) Dans et hors du fauteuil	P 6
C) Transport du fauteuil	P 6
D) Conduite du fauteuil par l'accompagnant	P 6
E) Déplacement en pente	P 6
F) Durée de vie	P 6
<u>3. DESCRIPTIF PRODUIT</u>	P 7 à 11
A) Appui tête	P. 7
B) La barre de poussée	P 7
C) L'assise	P 7
D) La couette	P 9
E) Roues avants et roues arrières	P 9
F) Repose-jambes	P 10
G) Repose pieds	P 10
H) Tablettes	P 10
I) Cales tronc	P 11
J) Poids de l'utilisateur	P 11
K) Emplacement de la plaque d'immatriculation	P 11
<u>4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</u>	P 11 à 12
<u>5. MAINTENANCE ET NETTOYAGE</u>	P 13
A) Maintenance	P 13
B) Nettoyage	P 13
C) Recyclage	P 13
<u>6. GARANTIE</u>	P 13 à 14

1. PRESENTATION GENERALE

Nous vous remercions pour l'achat de votre fauteuil VHP à pousser.

Nos produits sont élaborés et fabriqués en France en respectant les normes de qualité et de sécurité. Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce fauteuil. Veuillez la conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Ce manuel tient compte des développements de produits les plus récents. INNOV'SA se réserve toutefois le droit d'apporter des modifications sans être dans l'obligation d'adapter ou de remplacer au préalable les modèles délivrés.

Le fauteuil VHP à pousser est destiné aux personnes qui ont des difficultés à marcher ou sont désorientées.

Il est destiné au transport d'une seule personne.

Ce fauteuil est destiné à une utilisation intérieure / extérieure sous certaines conditions.

Il doit être poussé par un accompagnateur.

L'usage du fauteuil nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ces fauteuils ne doivent être utilisés que sur des surfaces où les quatre roues touchent le sol et où le contact est suffisant pour entraîner les roues de manières équilibrées.

N'utilisez ce fauteuil que sur des surfaces planes dont le sol est stable. Evitez toute utilisation sur un sol recouvert de gravier, de boue, de pavés ronds, d'herbes ou tout autre sol instable ou inégal.

Ce fauteuil ne doit pas être utilisé comme échelle, ni pour le transport d'objets lourds ou chauds.

En cas d'utilisation sur des tapis de sol, moquettes ou revêtements de sols non fixés, le revêtement de sol peut être endommagé.

Utilisez uniquement des accessoires INNOV'SA.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'absence ou l'inadéquation de l'entretien, ou par le non-respect des instructions de ce manuel.

Le respect des instructions d'utilisation et d'entretien est une condition essentielle de la garantie.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter votre revendeur.

AIDE ET ACCESSIBILITE



Pour les personnes dont le handicap bloquerait la lecture de cette notice, il est possible :

- de se rendre sur notre site www.innov.sa.com afin de retrouver cette notice et d'adapter la taille de la police.
- de contacter votre distributeur pour une présentation orale des consignes.

A) CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Les consignes de sécurité et d'utilisation du fauteuil nécessitent l'attention de l'utilisateur et de l'aidant. Cette notice d'utilisation pointe les procédures et techniques indispensables à une bonne utilisation du produit. Il est important de tester ces techniques jusqu'à que vous vous sentiez à l'aise dans l'utilisation du produit et dans ses opérations d'entretien les plus fréquentes. Utilisez cette notice comme guide de base, les techniques qui y sont présentées, ont été testées avec succès par de nombreuses personnes. INNOV'SA encourage chaque utilisateur et aidant à essayer ce qui fonctionne le mieux pour lui afin de s'adapter à son environnement. Toutefois, toutes les mentions indiquées sur ce manuel doivent impérativement être respectées. Les techniques inscrites dans ce manuel sont un point de départ pour l'utilisateur et la tierce personne, avec comme point le plus important, la sécurité. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

INNOV'SA ne recommande pas l'utilisation du fauteuil comme appareil d'entraînement. Ce matériel n'a pas été conçu et testé pour cela. INNOV'SA ne peut être tenu responsable en cas de blessure et la garantie sera considérée comme nulle. Durant l'utilisation, sauf pendant les opérations de franchissement, les 4 roues doivent être en contact avec le sol.

Ces consignes sont destinées à l'utilisateur et au distributeur.



Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance

Symboles figurant dans ce manuel



Avertissement

Indique une situation dangereuse susceptible de provoquer des blessures graves, voir la mort si elle n'est pas évitée.



Important

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures légères ou des dommages matériels.



Ne convient pas pour être utilisé comme siège dans un véhicule motorisé.

2. UTILISATION DU FAUTEUIL

!

L'utilisateur doit toujours déplacer le fauteuil, à l'aide de la barre de poussée, en position légèrement incliner afin que le repose pieds ne soit pas en contact avec le sol.



Ces fauteuils ne sont pas conçus pour être utilisés comme des sièges dans les véhicules à moteur.

La forme ergonomique du fauteuil ainsi que ces différentes adjonctions permettent une utilisation complète par des personnes souffrant des handicaps suivants :

- De paralysies
- Faiblesses/malformations des articulations
- Lésions des articulations
- Des maladies telles que l'insuffisance cardiaque et circulatoire, les troubles de l'équilibre ou la cachexie, et à des signes cliniques gériatriques

Il est contre indiqué d'utiliser le fauteuil coquille dans les cas ci-dessous :

- poids supérieur à 130 kg
- d'état physique et psychologique
- d'environnement de vie inadapté

Seul les accessoires INNOV'SA peuvent être utilisés sur ces fauteuils.

Le fauteuil est destiné aux personnes n'ayant plus de tenue musculaire, c'est pourquoi il convient d'être particulièrement vigilant lors de son utilisation.

Il est impératif de choisir le modèle s'ajustant le plus précisément à la taille du patient.

Lors de la mise en service, contrôler le bon fonctionnement des vérins et du frein, s'assurer que le harnais est verrouillé.

L'installation ou la désinstallation du patient dans l'assise se font impérativement, et quel qu'en soit le mode, avec le frein actionné, le repose jambes doit être en position verticale et la palette ajustée au sol afin d'éviter tout basculement vers l'avant.

Le patient étant installé dans l'assise, le fauteuil doit être incliné en position arrière pour supprimer le phénomène de glissement.

L'installation terminée, le fauteuil doit être stationné le frein activé sur un sol parfaitement horizontal et après chaque déplacement remettre le frein en action.

A) ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Votre fauteuil ne doit être utilisé que sur des surfaces où les quatre roues touchent le sol et où le contact est suffisant pour entraîner les roues de manière équilibrée.

Il est recommandé de s'entraîner à un usage sur des surfaces irrégulières (pavés, etc.), pentes, courbes et à passer des obstacles (bordures de trottoirs, etc.).

Le fauteuil ne fait pas office d'engin d'escalade ou pour transporter des objets chauds ou lourds.

En cas d'utilisation sur des paillasons, moquettes ou revêtements de sols non fixés, le revêtement de sol peut être endommagé.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'absence ou l'inadéquation de l'entretien, ou par le non-respect des instructions de ce manuel.

Le respect des instructions d'utilisation et des instructions de maintenance est une condition essentielle de la garantie.

B) DANS ET HORS DU FAUTEUIL



Si vous ne pouvez pas réaliser le transfert en toute sécurité, demandez à quelqu'un de vous aider.

1. Placez le fauteuil aussi près que possible de la chaise, du canapé ou du lit concerné par le transfert.
2. Assurez-vous que les freins du fauteuil sont bien enclenchés.
3. Desserrez le levier du repose-pied afin la palette touche le sol.
4. Procédez au transfert vers/ depuis le fauteuil.

C) TRANSPORT DU FAUTEUIL

Le meilleur moyen de déplacer le fauteuil consiste à le faire rouler sur ses roues. Si cela n'est pas le cas, saisir fermement le châssis à l'avant et à l'arrière. Ne pas saisir le fauteuil par les accoudoirs ni par les repose-pieds. Au moins deux personnes sont nécessaires pour transporter le fauteuil.

Pour transporter le fauteuil, quelques consignes doivent être respectées :



Transporter le patient assis dans le fauteuil est absolument à proscrire.

Placez l'assise du siège à l'horizontale en actionnant le levier de déblocage voulu et démontez le repose-pied.

Le fauteuil peut être maintenant transporté par deux personnes au moins.

Ne soulevez jamais le fauteuil par les roues et utilisez le châssis.

Le transport du fauteuil sur des escaliers/des marches doit toujours être exécuté par deux personnes. Le basculement du fauteuil est prohibé lors du transport.

Aucune personne ou aucun objet ne doit se trouver sous le fauteuil lors du transport. Sous peine de provoquer des blessures ou des dégâts

D) CONDUITE DU FAUTEUIL PAR L'ACCOMPAGNANT



- **Risque de brûlures, soyez prudent lorsque vous vous déplacez dans des environnements chauds ou froids (lumière du soleil, froid extrême, saunas, etc.)**
- **Pendant une certaine durée et lorsque vous le touchez les surfaces peuvent prendre la température de l'environnement.**
- **L'accompagnateur doit pousser le fauteuil à l'aide de la barre de poussé.**

E) DEPLACEMENT EN PENTE



L'aidant doit contrôler sa vitesse, et se déplacer sur les pentes aussi lentement que possible

- **Prenez en compte les capacités de l'aidant – s'il n'a pas la force suffisante pour contrôler le fauteuil, actionnez les freins.**
- **Si le fauteuil est équipé d'une ceinture de sécurité, utilisez-la.**
- **N'essayez pas de franchir des pentes trop difficiles.**

F) DUREE DE VIE

La durée de vie attendue de ce produit est de cinq ans lorsqu'il est utilisé quotidiennement et dans le respect des consignes de sécurité, des intervalles de maintenance et avec une utilisation correcte, comme indiqué dans le présent manuel. La durée de vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation.

3. DESCRIPTIF PRODUIT

A) LA CEINTURE VENTRALE

Le fauteuil est équipé d'une ceinture ventrale dont chacune des sangles est réglable et amovible. L'usage de celle-ci permet d'obtenir un meilleur positionnement dans le cas d'une faiblesse musculaire entraînant un défaut de posture, et permet également un complément de sécurité contre la chute.

Mise en place de la ceinture ventrale au fauteuil :

- Placez et fixez la ceinture abdominale de sorte que le patient soit assis au fond de son siège avec la zone lombaire contre le dossier du fauteuil.

Ajustez le serrage afin d'éviter que l'utilisateur puisse passer par-dessous et se blesser.

 **La ceinture ventrale doit être bouclée. Le réglage et la vigilance d'une tierce personne sont impératifs.**

B) BARRE DE POUSSEE

Située derrière le dossier, la barre de poussée permet à une tierce personne de propulser et diriger le fauteuil (photo 1).



Photo 1

C) L'ASSISE

Pour les modèles LIBERTY et EVASION

- Assise inclinable par vérin à gaz

Réglage en inclinaison

Pour incliner votre fauteuil, veuillez actionner la poignée située sur la barre de poussé du dos du siège (photo 1-A).

! Cette opération doit être effectuée exclusivement par l'accompagnant.

Pour le modèle LIBERTY e II

Réglage en inclinaison

Pour incliner votre fauteuil, veuillez utiliser la télécommande (photo 2).



Photo 2

- Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.
Bouton BLANC : Avant
Bouton VERT : Arrière
- Le bouton BLEU permet d'actionner le système DETENTE programmé pour modifier automatiquement l'inclinaison de votre fauteuil, permettant ainsi l'apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douces oscillations – programme de 35 mn)
- Le bouton JAUNE active la fonction MASSAGE par vibrations du coussin lombaire (Cycle de 5 mn)

Pour le modèle EVASION e et STARLEV II

Réglage en inclinaison

Pour incliner votre fauteuil, veuillez utiliser la télécommande (photo 3).

STARLEV II



EVASION e



Photo 3

- Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.
Bouton BLANC : Avant
Bouton VERT : Arrière

Télécommande verrouillable

Lors du branchement de votre fauteuil sur le secteur, **NE PAS APPUYER** sur les boutons de la télécommande durant 60 secondes.

Si toutefois, une coupure de courant ou autre, mettrait votre télécommande en mode « sécurité » (bloquée), veuillez réinitialiser la télécommande en effectuant un cycle complet d'inclinaison du fauteuil : de l'avant relevé jusqu'à l'inclinaison arrière complète ou débrancher votre fauteuil durant 60 secondes.

MAINTENANT votre télécommande est réinitialisée.

D) COUETTE

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

Pour découvrir les tutos de montage, veuillez scanner ce QR CODE.



E) ROUES AVANTS ET ARRIERES

Pour les modèles LIBERTY, LIBERTY e II & STARLEV II

4 roulettes diamètre 125 mm (photo 4).

- Toujours vérifier qu'il n'y ait aucun débris sur les roues avant utilisation
- Vérifier que les roues ne soient pas usées avant utilisation. Les remplacer le cas échéant.

! **En cas de franchissement, la hauteur d'un obstacle NE DOIT PAS ETRE supérieure au rayon de la roue. Si l'obstacle dépasse cette hauteur, il faut soulever le fauteuil.**

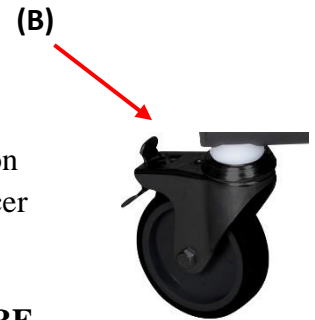


Photo 4

Frein

- Actionner le frein en appuyant vers le bas avec le pied (B)
- Pour libérer le frein relevez vers le haut avec le pied (B)

! **Ces freins ne doivent pas être utilisés pour ralentir le fauteuil. Vérifier que le frein ne touche pas les roues lors du déplacement.**

Pour les modèles EVASION et EVASION e

- Roues avant à bandage de 200 mm.
- Roues arrière à bandage de 300 mm.

! **Toujours vérifier qu'il n'y ait aucun débris sur les roues avant utilisation. Vérifiez que les roues ne soient pas usées avant utilisation. Les remplacer le cas échéant.**

En cas de franchissement, la hauteur d'un obstacle NE DOIT PAS ETRE supérieure au rayon de la roue. Si l'obstacle dépasse cette hauteur, il faut soulever le fauteuil.

Frein (photo 5)

- Actionnez le frein en appuyant vers le bas sur l'ailette avec le pieds (B)
- Pour libérer le frein appuyez vers le bas sur l'ailette avec le pied (C)

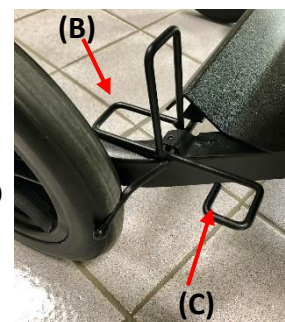


Photo 5

! **Ces freins ne doivent pas être utilisés pour ralentir le fauteuil. Vérifier que le frein ne touche pas les roues lors du déplacement.**

F) REPOSE JAMBES

Le repose-jambes est réglable en angle.

Pour les modèles LIBERTY et EVASION

Réglage du repose-jambes

- Le réglable en angle du repose-jambes est lié à l'inclinaison de l'assise et se fait avec la poignée d'inclinaison située sur la barre de poussée.
- Le réglage du repose-jambes doit être effectué par l'aidant.

Pour les modèles LIBERTY e II - EVASION e II & STARLEV II

Réglage du repose-jambes


Le réglable en angle du repose-jambes est lié à l'inclinaison de l'assise et se fait avec la télécommande. Il doit être fait par l'aidant.

G) REPOSE PIEDS (photo 6)

Le repose-pieds est amovible et ajustable hauteur.

Réglage du repose-pieds

- Desserrer la molette (D) pour libérer le réglage en hauteur du repose-pieds.
- **Toujours vérifier que rien n'est sous le repose pieds avant le remettre le fauteuil en position droite afin d'éviter un d'écrasement.**
- **NE PAS se tenir debout ou prendre appui sur la palette si elle n'est au contact du sol.**
- **Toujours vérifier que la palette soit au contact avec le sol avant d'entrer ou de sortir du fauteuil.**
- **Le repose pieds est un élément de sécurité et ne doit pas enlevé.**

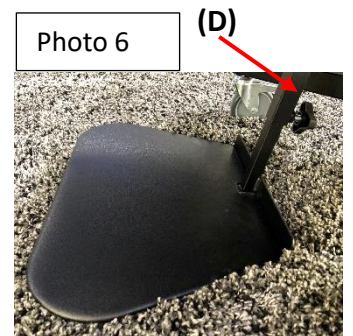

H) TABLETTES

Pour les modèles EVASION, EVASION e

Tablette à rangement verticale (photo 7)

- Insérer la tablette dans le tube destiné à cet effet sur le châssis.
- Serrer la molette



Photo 7

Pour les modèles LIBERTY, LIBERTY e II et STARLEV II

Tablette latérale (photo 8)

- Insérer le support de tablette dans les ouvertures prévues à cet effet sur la colonne.

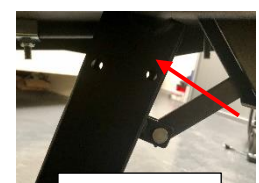


Photo 8

I) CALES-TRONC (photo 9)

- Fixer la barre latérale sur la barre de poussée.
- Insérer-le(s) cale(s) tronc dans le tube prévu à cet effet.
- Serrer-la(les) molettes (s)



Photo 9

J) POIDS DE L'UTILISATEUR

Le poids maximum de l'utilisateur indiqué par le fabricant est de **130kg**

K) EMPLACEMENT DE LA PLAQUE D'IDENTIFICATION

Une plaque d'identification est collée à l'arrière de votre fauteuil (photo 10)



Photo 10

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Fauteuil VHP à pousser	CE
Poids maxi utilisateur	130 kg	
Largeurs d'assise sur EVASION – EVASION e, LIBERTY	300 mm, 360 mm, 420 mm, 480 mm et 540 mm	
Sur LIBERTY e II – STARLEV II	380 mm, 440 mm, 500 mm, 560 mm, 650 mm	
Profondeur d'assise	480 mm	
Hauteur du dossier	870 mm	
Largeurs hors tout	Largeur d'assise + 250 mm	
Roues avant/arrière sur modèles EVASION et EVASION e	2 roues à bandage de 200 mm à l'avant 2 roues à bandage de 300 mm à l'arrière	
Roues avant/arrière sur modèles LIBERTY, LIBERTY e, STARLEV'	4 roulettes à frein diamètre 125 mm	
Freins	Enclenchement manuel au pied	
Repose-Jambes	Réglable en angle	
Repose pieds	Réglable et amovible	
Revêtements	PVC/PU : Cacao, Ebène, conforme aux normes 1021-2 - Rapport d'essai n° 367160735 Polyester: Choco Ed, Black Ed, Gris Chiné et Marron Chiné conforme aux normes 1021-2 – Rapport d'essai n° 18.04333.01 & n° 18.03363.01	
Garniture des couettes	Fibre creuse siliconée	
Châssis	Acier	
Couleur châssis	Noir (Epoxy)	
Poids du fauteuil	Entre 33 et 50 kg selon modèle	

Longueur total	LIBERTY, LIBERTY e II, EVASION, EVASION e		STARLEV'	
		De 1000 à 1100 mm selon taille		Avec repose-pieds : 1000 mm Sans repose-pieds : 830 mm
Longueur inclinée	De 1450 à 1570 mm selon taille		Avec repose-pieds : 1460 mm Sans repose-pieds : 1380 mm	
Largeur	De 650 à 770 mm selon taille		630 mm min à 790 mm max selon taille	
Hauteur totale	1250 mm		Position assise : 1350 mm Position releveuse : 1480 mm	
Hauteur sol accoudoir	650 mm		680 mm	
Hauteur sol assise	450 mm		460 mm	
Inclinaison	30°		-16° à +28°	
	Mini		Maxi	
Valeurs de performance	LIBERTY, LIBERTY e II, EVASION, EVASION e	STARLEV'	LIBERTY, LIBERTY e II, EVASION, EVASION e	STARLEV'
Longueur hors-tout avec repose-pieds (en mm)	950	1000 assis	1350	1460 allongé
Largeur hors-tout (en mm)	640	630	760	790
Longueur du fauteuil plié (en mm)	710		710	
Largeur du fauteuil plié (en mm)	640		760	
Hauteur du fauteuil plié (en mm)	1320		1320	
Poids total du fauteuil (en kg)	28	33	38	43
Poids de la pièce la plus lourde (en kg)	12		22	
Angle du plan d'assise (degré)	0	-16	30	+28
Hauteur du plan d'assise au niveau du bord avant (en mm)	450		450	670
Angle du dossier (degré)	95		95	
Distance entre le repose-pieds et l'assise (en mm)	450		450	460
Angle formé par la jambe et le plan d'assise (degré)	20	15	90	
Distance entre les accoudoirs et l'assise (en mm)	170	220	170	220
Distance entre l'avant des accoudoirs et le dossier (en mm)	400	390	400	390
Diamètre de la main courante	Ne s'applique pas			
Emplacement horizontal de l'essieu (en mm)	125	160	125	160
Espace de giration (en mm)	355	500 assis	-	730 allongé
Température de stockage et d'utilisation	+5°C		+41 °C	
Humidité de stockage et d'utilisation	30%		70%	
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérances ± 15mm / 1.5 kg / 1.5 °				

5. MAINTENANCE & NETTOYAGE

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

A) MAINTENANCE REGULIERE

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le. Remplacez le revêtement si nécessaire.

B) NETTOYAGE

Nettoyez les éléments en plastique de votre fauteuil avec un produit de nettoyage conçu à cet effet. Lisez aussi les informations spéciales sur le produit. Utilisez exclusivement une éponge ou brosse douce. Les pièces en plastique sont par exemple les freins, la plaque repose-pieds, etc.

C) RECYCLAGE



L'élimination/le recyclage doivent avoir lieu conformément à la législation et aux règlements en vigueur dans chaque pays.

Toutes les pièces électriques doivent être détachées et recyclées en tant que composants électriques.

Les pièces en plastique doivent être envoyées pour incinération ou recyclage.

Les pièces en acier et les roulettes doivent être traitées comme des déchets métalliques.

6. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie du fauteuil concerne tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 2 ans, à partir du jour de livraison. La date d'achat doit être inscrite sur le certificat inclus dans ce guide.

De par cette garantie nous vous proposons uniquement la remise en état ou l'échange gratuit des pièces reconnues défectueuses après accord de INNOV'SA. Nous tenons à préciser que cette remise en état ou cet échange ne pourra être effectué avec des pièces neuves, des sous-ensembles neufs ou un échange standard des dites pièces qu'après appréciation de INNOV'SA.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts provoqués par un montage et/ou une réparation inadéquate ou incorrecte et non conforme, par la négligence et l'usure ainsi que par des modifications des composants ou des éléments par l'utilisateur ou par un tiers. Dans ces cas, notre responsabilité de fabricant ne pourra être engagée.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des garnitures, des roues, des tubes (en caoutchouc), etc. les dommages résultant de l'usage de la force ou d'une utilisation non-conforme ne sont pas couverts. Les dommages causés par les utilisateurs pesant plus que le poids maximum autorisé pour chaque modèle de fauteuil sont exclus de la garantie. La garantie n'est valable que si les instructions de maintenance sont scrupuleusement respectées.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Code Postal : _____

Ville : _____

Date d'achat : _____

Afin de valider votre garantie, la date d'achat doit être clairement indiquée.

Modèle : _____

Numéro de Série : _____

Cachet du distributeur

Merci de respecter l'environnement, ce produit et ses emballages font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez votre produit et ses emballages en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets permettra la protection de l'environnement.

En vue d'accroître toujours plus la qualité de nos services nous sommes à l'écoute de vos remarques, quant à la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits développés.

NOTES
