



## **Fauteuil releveur 1 moteur JUST**

### **Manuel d'utilisation**





## **INTRODUCTION :**



### **OBLIGATOIRE !**

Lisez et respectez les consignes et informations contenues dans ce manuel avant de tenter d'utiliser votre fauteuil releveur pour la première fois

Dans certaines situations, vous aurez besoin de la présence d'une personne aidante qualifiée afin de vous initier. Une personne qualifiée peut être un membre de votre famille ou un professionnel de la santé formé pour vous assister lors de l'exécution d'activités quotidiennes telles que l'utilisation sécuritaire de votre fauteuil releveur.

Vous trouverez ci-dessous des conseils et autres consignes qui vous seront utiles pour le bon usage de votre fauteuil.

### **IMPORTANT !**

Nous avons conçu votre fauteuil pour que celui-ci vous procure confort et facilité d'utilisation.









Cependant, afin de prévenir blessures et dommages au produit, vous ne devez pas modifier, ajouter, retirer ou rendre inutilisable quelques fonctions, pièces ou parties de votre fauteuil releveur. Des modifications non-autorisées peuvent annuler la garantie.

**NOTE :** Utilisez seulement des pièces de remplacement d'origine pour les réparations.

### **AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS**

Avant d'utiliser le fauteuil, ranger et éloigner tous les obstacles pouvant se trouver devant ou derrière le produit afin de laisser suffisamment d'espace lors du fonctionnement. Il est interdit de forcer le mouvement ou l'inclinaison du fauteuil.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments d'attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.

	<p>MISE EN GARDE ! Soulignent les conditions/situations intentionnellement dangereuses qui peuvent entraîner des blessures et/ou des dommages.</p>
	<p>OBLIGATOIRE ! Ces actions doivent être exécutées tel que spécifié sous peine de vous blesser ou de provoquer des dommages matériels non couverts par la garantie.</p>
	<p>INTERDIT ! Ces actions sont interdites ; ne jamais tenter sous aucune considération sous peine de vous blesser et/ou de provoquer des dommages matériels.</p>
	<p>Endroit où vous pouvez pincer/écraser vos doigts. Ne placez pas d'objet ou vos doigts près de pièces en mouvement.</p>
	<p>Lisez et respectez les consignes présentées dans ce manuel.</p>
	<p>Poids maximum 140 kg.</p>
	<p>Ne placez pas d'objets sous le fauteuil. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions y compris votre animal de compagnie ou un enfant près du fauteuil pendant le fonctionnement.</p>
	<p>Pour usage intérieur seulement. Ne pas exposer à la pluie, neige, glace, sel, ou eau stagnante. Gardez dans un endroit propre et sec.</p>
	<p>NOTE : Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit d'apporter les changements nécessaires de temps à autre. Ces changements au produit peuvent causer des variations entre les illustrations et explications contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est disponible sur simple demande.</p>



## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et prendre conscience des dangers encourus. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas se faire par les enfants sans surveillance.
2. Cet appareil ne peut uniquement être utilisé qu'avec les accessoires fournis avec le produit.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur dans sa limite de durée de garantie, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. Pour l'installation, vous devez vous référer à la notice de montage.
5. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter votre revendeur.



**Le produit que vous avez acheté a été conçu selon les toutes dernières technologies afin de maximiser la sécurité et le confort. Nous sommes certains que ce fauteuil vous procurera plusieurs années de confort et de fiabilité pour votre usage quotidien. Respecter ces consignes de sécurité et le fonctionnement afin de vous assurer d'obtenir un fonctionnement fiable et sans problème.**

**Lisez et respectez toutes les instructions, mises en garde et notes de ce manuel ainsi que celles incluses dans la documentation accompagnant le produit avant de tenter de l'utiliser pour une première fois. De plus, soyez avisé que votre sécurité est tributaire de votre bon jugement ainsi que des conseils fournis par votre professionnel de la santé, votre détaillant et/ou une personne qui peut vous aider.**

**Si vous ne comprenez pas quelques informations que ce soit dans ce manuel, ou si vous avez besoin d'aide pour la préparation ou la mise en place de votre produit, s.v.p. contactez votre revendeur. Suivez les instructions, mise en garde et les notes incluses dans de manuel ainsi que sur les labels apposés sur le produit sous peine de vous blesser, d'endommager votre fauteuil et d'annuler la garantie.**

### **ATTENTION :**

**En acceptant ce produit vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protections et les divers dispositifs de sécurité.**

**Votre fauteuil possède une limite de poids qui est de 140 kilos.**

## **OBLIGATOIRE !**

**N'excédez pas la capacité de poids maximum de votre fauteuil. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages et blessures découlant du non-respect de cette consigne.**

**Votre fauteuil n'est pas conçu pour une utilisation prolongée et régulière comme lit d'appoint. Cependant vous pouvez l'utiliser pour un repos limité tel qu'une sieste.**

## **DANGER DE SE PINCER / ÉCRASER LES DOIGTS**

**Le mécanisme à ciseaux du fauteuil possède des étiquettes de mise en garde aux endroits où il y a danger de se pincer/écraser les doigts. Gardez des endroits libres et sans obstructions.**



**Ne placez pas d'objets ou un membre dans la trajectoire du mécanisme.**



## **NE PLACEZ AUCUN OBJET SOUS LE FAUTEUIL**

**Assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction incluant un petit enfant ou un animal de compagnie avant de le faire fonctionner.**




## **MISE EN GARDE !**


**Évitez les risques de chute ou de pincement/écrasement de doigts. Respectez toutes les consignes et précautions.**

# MANUEL D'UTILISATION :

## 1. Prise de courant murale

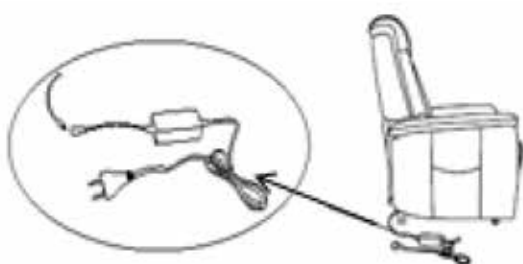

## 2. Télécommande pour fauteuil 1 moteur

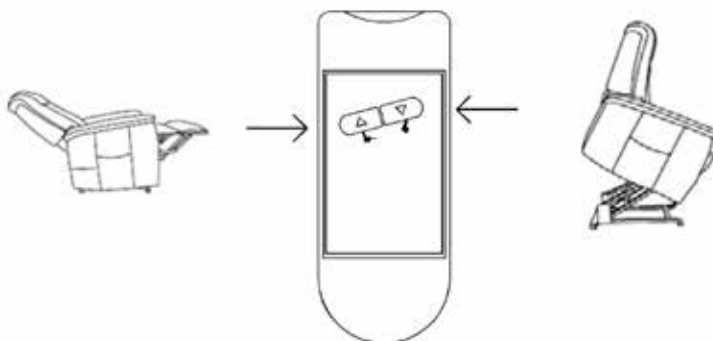

## **ASSEMBLAGE :**


### **Votre fauteuil requiert un peu d'assemblage avant l'utilisation initiale.**

Pour assembler votre fauteuil, installez tout d'abord le dossier. Faites glisser l'arrière tout en vous assurant que les deux fixations du dossier s'insèrent dans les deux ouvertures sur le fauteuil. Appuyez fermement sur le dossier pour le bloquer. Assurez-vous que les deux côtés du dossier sont enclenchés avant toute utilisation du fauteuil (votre revendeur a peut-être déjà effectué ces opérations avant la livraison).

Reportez-vous à la fiche livrée avec votre fauteuil.

Différents dessins expliquent et montrent les étapes à suivre.

N'hésitez pas à demander de l'aide pour éviter de vous blesser en manipulant le fauteuil ou de l'endommager.

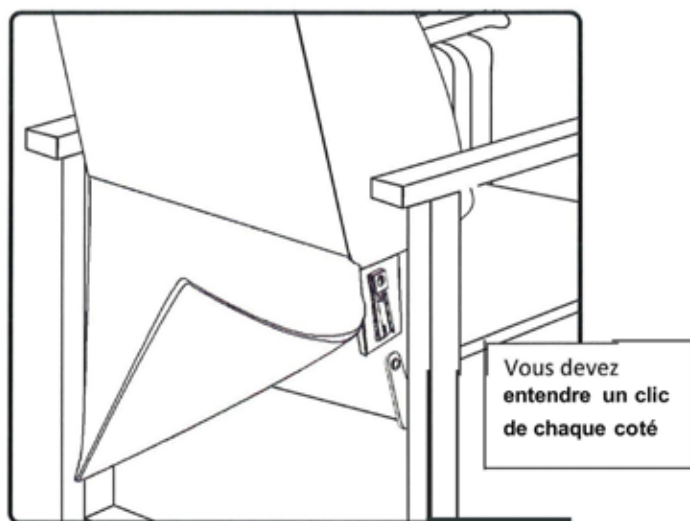



## **ENTRETIEN ET MAINTENANCE :**

1. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit. L'usage de solvant ou de produits abrasifs est strictement interdit.

**Votre fauteuil doit subir des vérifications de routine.**

## **SOINS DU REVÊTEMENT :**

Inspectez le revêtement pour voir s'il y a des fils tirés, des fentes ou des déchirures. Nous recommandons de le nettoyer régulièrement avec un aspirateur et une brosse douce afin de retirer la poussière. Pour enlever une tache, reportez-vous au guide de traitement des tâches que nous pouvons vous fournir.

### **MISE EN GARDE !**

**Le revêtement ne doit jamais être mis en contact direct avec une source de chaleur telle qu'une chauffeuse ou une cigarette sous peine de vous blesser et/ou de provoquer un incendie.**

### **MISE EN GARDE !**

**Il est fortement recommandé de ne pas fumer lorsque vous utilisez votre fauteuil.**

**Si vous décidez de fumer dans votre fauteuil, vous devez respecter les consignes suivantes:**

**Ne laissez pas de cigarette allumée sans surveillance.**

**Gardez les cendriers à distance du fauteuil releveur.**

**Assurez-vous de bien éteindre les mégots de cigarette avant d'en disposer.**

**N'utilisez pas de nettoyeur à base de solvant pour enlever une tache. Ne saturez pas le tissu. Ne placez pas le fauteuil en plein soleil afin de prévenir les dommages au revêtement.**

### **TÂCHES LIQUIDES**

Boissons douces, la bière, le cola, le vin, le café, le jus de fruit, le lait, le pétrole.

Utiliser un papier absorbant pour enlever le liquide.

À l'aide d'un tissu propre humide, frotter légèrement jusqu'à disparition de la tache.

## **TÂCHES GRASSES**

Le beurre, le yaourt, le chocolat, la crème, les sauces, les gâteaux.

Enlever le maximum de la tâche en utilisant une spatule.

À l'aide d'un tissu propre (sec), frotter légèrement pour enlever le maximum de la tâche.

À l'aide d'un tissu propre humide imprégné de savon, frotter doucement en un mouvement circulaire.

Répéter l'opération si nécessaire. Rincer.

Terminer l'opération en utilisant un papier absorbant.

## **TÂCHES SPÉCIALES**

Les crayons gras, les stylos à bille, les stylos feutre...

À l'aide d'un tissu propre imprégné d'alcool, tamponner doucement la tâche.

Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire.

Frotter doucement en un mouvement circulaire.

Terminer l'opération en utilisant un papier absorbant.

## **LE ROUGE À LÈVRE, LE CIRAGE DE SOULIER, LA GRAISSE**

À l'aide d'un tissu propre imprégné d'un détergent liquide (type liquide vaisselle), tamponner doucement la tâche.

Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire.

Frotter doucement en un mouvement circulaire.

Rincer à l'eau claire.

Terminer l'opération en utilisant un papier absorbant.

## **AUTRES TÂCHES SPÉCIALES**

La cire, pâte à modeler, gomme à mâcher.

- Pour la cire : à l'aide d'une spatule, enlever le maximum, laisser sécher puis utiliser une brosse molle.
- Pour la pâte à modeler ou la gomme à mâcher : utiliser des glaçons pour durcir la tâche, puis à l'aide d'une spatule enlever le maximum, puis utiliser une brosse molle.

## **MISE AU REBUT ET RECYCLAGE:**

Votre fauteuil doit être mis au rebut en respectant les lois et règlements.

Contactez votre organisme local pour obtenir les informations sur la mise au rebut et le recyclage des pièces en métal, en bois, en plastique et l'emballage de votre fauteuil.



Protégez l'environnement ! Veillez à respecter les réglementations locales : déposer les équipements électriques ne fonctionnant plus dans un centre de traitement des déchets approprié.

### **MISE EN GARDE !**

**Les sacs en plastique sont dangereux pour les jeunes enfants. Assurez-vous d'en disposer de façon sécuritaire.**

## **GARANTIE :**

La garantie est limitée à 2 ans :

**Nous réparerons ou remplacerons les pièces suivantes défectueuses après expertise :**

- Structure
- Ciseaux du mécanisme

**N.B. : le fabricant se réserve le droit de remplacer seulement la pièce du mécanisme qui s'avère défectueuse.**

**En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protections et dispositifs de sécurité. Lisez et respecter toutes les instructions, mise en garde et note du livret d'instruction.**

**Suivez les instructions, consignes et mise en garde sous risque de vous blesser ou d'endommager votre intérieur et de prendre le risque d'annuler le présente garantie.**

### **Exclusion de la garantie :**

- Dommages résultant de l'abus, mauvais usage, réparations non autorisées, négligence, accidents, altérations, chocs ou modification du produit.
- Dommages causés pendant la manipulation.
- Tous dommages extraordinaires, directs ou indirects.
- Après la période de garantie, le fabricant n'aura aucune obligation de quelque type que ce soit.





Capvital  
ZA - 12, voie des Préaux  
89310 NITRY