

NOTICE D'UTILISATION

Tabouret de douche avec accoudoirs **Hao 2 (12440KD-1)**




Lire attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.




2. Mettre le tabouret sur ses pieds puis insérer et fixer les accoudoirs de chaque côté de la structure d'assise à l'aide des boutons poussoirs. **S'assurer que les 4 boutons poussoirs soient parfaitement et complètement engagés dans les trous**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur	 = 136 kg
Dimensions hors-tout (l x p x h)	54,5 x 43 x 71 cm (maxi.) / 54,5 x 40,5 x 58 cm (mini.)
Hauteur sol/assise	réglable de 42 à 54,5 cm (6 positions - pas = 2,5 cm)
Hauteur accoudoir	17 cm
Dimensions assise (l x p x h)	40 x 33 x 4 cm
Embouts antidérapants	x 4 diamètre au sol 5,5 cm
Matières	structure : aluminium assise : plastique dur
Couleur	blanc
Poids	2,6 kg

3. Contrôler que toutes les vis fixant le châssis sous l'assise sont correctement serrées avant d'utiliser le tabouret. Ne pas utiliser de tournevis électrique ou pneumatique pour bloquer les vis.
4. Régler la hauteur des pieds du tabouret (adaptée à la morphologie de l'utilisateur) à l'aide des boutons poussoirs. **Sur les 4 pieds du tabouret, les boutons poussoirs destinés au réglage en hauteur doivent tous être bien engagés et positionnés au même niveau.**

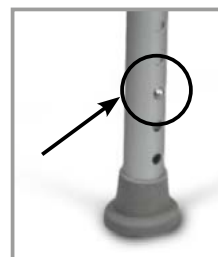

Demandez à un professionnel de santé de vous expliquer le fonctionnement du tabouret et d'en effectuer le réglage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

Le tabouret est livré partiellement monté. Il est nécessaire d'assembler les 4 pieds et les 2 accoudoirs.

1. Positionner la structure d'assise à l'envers puis emboîter les 4 pieds en veillant à ce que **les 4 boutons poussoirs soient parfaitement et complètement engagés dans les trous**. S'assurer que les 4 embouts antidérapants soient suffisamment enfoncés sur les 4 pieds.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS :

- **Ne jamais utiliser le tabouret sans avoir fixé les 2 accoudoirs.** L'utilisateur doit s'asseoir dans le sens prévu pour éviter une mauvaise répartition des forces de pression exercées sur la structure.
- **Respecter le sens pour s'asseoir sur le tabouret. L'avant de l'assise présente 2 formes incurvées de manière à épouser la forme des cuisses de l'utilisateur une fois assis.**
- Le tabouret ne doit pas être utilisé pour supporter des personnes de plus de **136 kg**.
- Le sol doit être plan, stable (ne pas mettre le tabouret sur un tapis antidérapant).
- Vérifier, avant chaque utilisation, que tous les composants sont solidement fixés et que les 4 pieds touchent le sol.
- Vérifier que le tabouret est bien positionné sur ses pieds et qu'il est parfaitement stable.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir seul en position assise.
- Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- Ne jamais déplacer le tabouret si le patient est assis dessus.
- Ne pas se mettre debout sur l'assise.
- Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière du tabouret.

ENTRETIEN RÉGULIER :

- Essuyer le tabouret après utilisation pour enlever tout excès d'eau. Le stocker dans un local sec et aéré.
- Ce tabouret requiert un nettoyage à l'aide d'un chiffon doux (utiliser de l'eau tiède et un détergent doux).
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'Eau de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le tabouret.
- Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage et que les tubes ne sont ni tordus, rouillés ou endommagés.
- Faire vérifier le tabouret, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.

CONDITIONS DE GARANTIE :

Le tabouret est garanti un an. Cette garantie correspond à un emploi normal du tabouret et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final.


Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.



Importateur : Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame
BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



Com-Da Healthcare CO., Ltd.
Unit 3, N°94, Dongcheng Road, dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong
Province, Chine

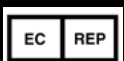

Viacert (UK) Technology Limited, RM101, Maple House, 118 High Street, Purley, London,
England, Royaume-Uni, n CR82AD

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE